



ULTRADENT Products – USA

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!

EtchArrest ЕтчАрест Киселинна бариера/Неутрализатор

Състав:

Калциев киселинен неутрализатор с активна съставка натриев бикарбонат. Достатъчно вискозен, за да не тече по вертикални повърхности, но същевременно може да се втича в малки процеци. Измива се с вода.
Спринцовка – 1,2 ml.

Индикации:

ЕтчАрест се поставя преди ецващите гелове, като предпазва тъканите и съседните възстановявания. Използва се за неутрализиране на порцелан етч – преди отстраняването му, като предпазва от вредните киселинни разпръсквания.

Указания за работа:

1. Отвийте капачката от спринцовката.
2. Завийте Блэк Микро канюла здраво върху спринцовката.
3. Проверете течливостта на материала през канюлата преди употреба, като пробвате с малко количество материал върху хартиена подложка. За да постигнете оптимален контрол, дръжте буталото на спринцовката върху дланта си, вместо по обичайният начин, с палец върху буталото.
4. Поставете капка или слой върху всички тъкани, които трябва да се предпазят.
5. Ецвайте повърхностите, преди бондинг процедурата. Предлагаме Ултра-Етч 35% фосфорна киселина за дентин и емайл. Използвайте Порцелан Етч (9,5% флуороводородна киселина) за порцелан. Ако ецвате порцелан, покрийте съседния дентин и емайл с ЕтчАрест преди ецването на порцелана. Порцелан Етч не е подходящ за обработване на дентин и емайл. След ецването на порцелана, неутрализирайте киселината и отвийте от дентина и емайла преди обработване с Ултра-Етч.
6. Мехурчетата са видими, когато киселината влиза в контакт с ЕтчАрест. Оставете ЕтчАрест докато продължава ецването. За да неутрализирате киселината, поставете ЕтчАрест в киселината като разбърквате с канюла, докато цветът на ецващия материал стане неразличим. Отстранете неутрализираната киселина с вакуумна струя близо до повърхността и после изплакнете с воден спрей.
7. Поставете бондинг и възстановете, използвайки адхезивна система по свой избор. Предлагаме ПикЮ1, следван от Амелоджен композит за директно възстановяване.

Предупреждения:

1. ЕтчАрест може да бъде поставен върху всякаква дентинова повърхност в близост до ецваната с порцелан повърхност, тъй като флуороводородната киселина е неподходяща за поставяне върху дентинови тъкани. Ако тези тъкани изискват третиране с фосфорна киселина също, тогава използвайте абразив (като пемза или диамантен борер), за да премахне повърхностния слой с по-високо рН, ако е подходящо.
2. Не използвайте при пациенти с химическа хиперчувствителност или с чувствителност към натриевия бикарбонат.
3. Почистете и дезинфекцирайте спринцовките между пациентите. Силно се препоръчва употребата на Ултрадент Сиридж Кавърс запечатани с Импалс Сиилър като защитна бариера срещу замърсяване.

За стоматологична употреба само!

Условия за съхранение: Да се съхранява на стайна температура. На място недостъпно за деца.

Срок на годност: 36 месеца. Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.
Последна редакция на листовката: 2003 год.

Производител: **Ultradent Products Inc., USA**

Вносител: **MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755**