



Flor-Opal **Флор-Опал** **Дълготрайно излъчващ флуориден гел**

Състав:

Уникален постоянно излъчващ 0.5% флуориден йон в лепкав, силно вискозен гел, който се поставя в индивидуално изработена шина. Спринцовка - 1.2 ml. Флор-Опал е чист, почти без вкус, силно вискозен лепкав гел с рН ~6.5.

Индикации:

Флор-Опал е създаден за употреба, когато е желателно локално флуоридно приложение посредством шини в домашни условия (например при лечение на пародонтални заболявания, предпазване от кариеси, избелващ процес, коренова чувствителност). Използва се при пациенти, които имат повишена чувствителност при избелване на зъбите или след пародонтални процедури. Препоръчва се, когато са нужни дълготрайни насищания с флуорид.

Указания за работа:

1. Прочете инструкциите преди употреба или преди да дадете на пациента продукта.
2. Направете шини подходящи за нуждите на пациента. Вижте лабораторните инструкции (стр.2). Зоните на чувствителност трябва да бъдат отбелязани на модела. Ако пациентът вече има изработени шини за избелване, обяснете му да поставя Флор-Опал по същия начин както поставя избелващият гел в шините.
3. Флор-Опал се дозира от 1.2 ml спринцовка. Поставя се цялото съдържание на спринцовката в шината. Шината се зарежда с гела от инцизалната и оклузалната страна.
4. Продължителността и колко пъти трябва да се носи шината с флуоризиращия гел, зависи от състоянието, заболяването, пациента и стоматолога. Препоръчителното лечение по принцип е от 2 до 8 часа. Носенето на шините нощно време също може да бъде предложено на пациента, тъй като по принцип гелът остава активен в шината между 8 и 10 часа, защото мускулната активност както и слюнкоотделянето са по-слаби. Активността на гела през деня е обикновено между 4 и 6 часа.
5. Шините трябва да се снемат по време на хранене. Като сваля шините, пациентът трябва да си измие зъбите. Да не се поглъща получената течност по време на изплакване на зъбите. Шините трябва да се измият и да се поставят в кутийката, предназначена за тях. Трябва да се поставя нов гел при всяка апликация.
6. Гелът може да се затопли леко преди поставяне в шините, за да се избегне термична чувствителност ако е бил съхраняван при по-ниска температура.

Лабораторни инструкции:

1. Направете модел, необходим ви за изработването на стандартната шина за избелване. Поставете 0.5 -1.0 мм ЛС Блок–Аут резан върху чист, сух модел.
2. Осветете ЛС Блок–Аут резан за 2 минути с фотополимерна лампа (Ultra-lume). При употреба на интраорална лампа (около 20-40 сек. на зъб). Изтрийте кислородно инхибиран слой.
3. С вакуум формер (UltraVac) загрейте Sof-Tray плака докато провисне около 1 инч. Активирайте вакуума и адаптирайте меката плака върху модела. Охладете модела и го отстранете от машината.
4. Изрежете излишното количество материал с назъбена ножица за пластмаса.
5. Изрежете излишния материал от плаката. Контурирайте границата на шината, така че да се избягва досег с френома и подобни анатомични структури.
6. Върнете шината върху модела и проверете нейната разтегливост. Внимателно запалете лъскавите краища по един квадрант само (с Blazer Micro Torch).
7. Докато е още топла, задръжте периферията на всеки сегмент силно върху модела в продължение на 3 секунди с навлажнен пръст. Ако не достига нужната дължина, внимателно нагрейте и издърпайте материала до желаното място. Ако материалът се изтъни прекалено много, трябва да се направи нова шина.

При поява на чувствителност при избелване на зъбите, употребата на избелващия гел и флуоризиращия гел се редуват през ден. Една вечер се поставя от избелващия гел в медикаментозната шина, а на следващата вечер от флуоризиращия гел.

Предупреждения:

1. Ако се появят някакви проблеми, нека пациентът да спре лечението и да се обърне към стоматолога.
2. Пациентите не трябва да поглъщат големи количества от Флор-Опал гела. Излишното или по-голямо количество гел от необходимото, трябва да се измие с четка и да се изплакне, а не да се поглъща. Не гълтайте.
3. Съхранявайте далеч от пряка слънчева светлина и силна топлина. Флор-Опал гелът може да се съхранява при стайна температура.

Шината с флуоризиращия гел трябва да се сваля при хранене. След свалянето на шината, пациентът трябва да измие шината с четка и вода. Да не се гълта разтвор по време на миене.

За стоматологична употреба само.

Условия за съхранение:

Да се съхранява на стайна температура от 18°C до 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Срок на годност: Срок на годност: 36 месеца

Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

Последна редакция на листовката
1998 г.

Производител: Ultradent Products Inc., USA
Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755