



FOTOSAN

Инструкции за употреба

Полезни съвети

Основни принципи на манипулациите:

По-дългото излагане на светлина унищожава повече бактерии. Вие не можете да предозирате с FotoSan Agent (катализатор на фотохимичните процеси). Времевите настройки в този наръчник са само препоръчителни. Остри инфекции или обострени хронични процеси могат да се благоприятстват от двойно време на излагане и/или повторение на процедурата. FotoSanAgent може да е безцветен преди облъчването, но след като се свърже с кислорода и се активира ще стане син на цвят.

- Разклатете FotoSan Agent преди употреба
- FotoSan Agent боядисва тъкани, ако се разлее.
- Ако светлината стане прекалено гореща, може да смените покритието

Ендодонтия

Начало:

Почистете и оформете кореновите канали както обикновено, използвайки изобилно количество натриев хипохлорид или подобен препарат.

Лампата Fotosan се използва с покривен и дълъг накрайник (ендодонтски накрайник)

Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755
www.miplant.bg

Стъпка 1:

Подсушете каналите с хартиени щифтове

Стъпка 2:

Изтеглете необходимото количество от FotoSan Agent с ниска вискозност в спринцовката, завъртете иглата подходяща за ендо промивка и напълнете канала. Избягвайте образуването на въздушни балончета: Използвайте малък размер ръчна пила, за да разсеете всички балончета, които могат евентуално да се получат.

Стъпка 3:

Вкарайте ендо накрайника докато срещнете съпротива и активирайте светлината за 30 секунди (с големия бутон). Светлината ще прекъсне автоматично.

Стъпка 4:

Изплакнете и подсушете канала. Повторете същата процедура и за други канали.

Полезни съвети:

В случай, че имате проблем с достигането на канала, ендо накрайника може да бъде позициониран в канала без да бъде закачен за лампата. Облъчването може да бъде постигнато като се държи лампата колкото е възможно по-близо до ендо накрайника по време на активацията.

Промяната в цвета на камерата на пулпата може да се появи по времето на ендодонтско лечение – то може да бъде премахнато като използвате EDTA преди запълването на кореновия канал. Обцветяването ще изчезне веднага щом канала е запечатан срещу кислород.

Ниско вискозният Foto San Agent може да бъде задържан в канала като се приложи високо вискозен FotoSan в отвора на канала като запушалка.

**Манипулации на гингивата
Периодонтит/Периимплантит****Начало:**

Направете обичайното почистване на зъбен камък и заглаждане на кореновата повърхност. Лампата FotoSan се използва с покривен и дълъг накрайник , следван от къс накрайник.

Стъпка 1:

Изтеглете подходящото количество от Foto San Agent средна или висока вискозност в спринцовката, поставете подходящата игла и напълнете джоба.

Стъпка 2А:

За дълбоки джобове(по големи от 5мм) поставете дългия накрайник колкото е възможно по-дълбоко и осветете 10 секунди.

Стъпка 2Б:

Продължете като използвате затъпения накрайник 10 секунди на външната стена на джоба, използвайте заедно орално и вестибуларно за съответния зъб, като се държи контакт с повърхността на гингивата.

Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755

www.miplant.bg

Бележка:

За по-плитки джобове (по-малки от 5 мм) стъпка 2А може и да не е задължителна.

Стъпка 3:

Изплакнете джоба с физиологичен разтвор.

Повторете процедурата за съответните зъби.

Гингивити

Стъпка 1:

Изтеглете необходимото количество от FotoSan Agent средна или висока вискозност със спринцовката, поставете подходящата игла и поставете гела под възпалената гингива.

Стъпка 2:

Използвайте затъпления накрайник 10 секунди на повърхността на гингивата.

Стъпка 3:

Изплакнете с физиологичен разтвор.

Лечение на кариеси

Лампата FotoSan може да се използва за деконтаминиране на тънък пласт от кариозен дентин. Особено полезен е когато кариесът е в контакт с пулпата и покриването е препоръчително. Екскавирайте колкото може повече кариозния дентин.

Стъпка 1:

Използвайте FotoSan Agent средна вискозност в кавитета и осветете 10 секунди със закачен затъпен накрайник. Позиционирайте накрайника колкото е възможно повече към гела. Контактът е за предпочитане, в противен случай третирайте допълнителни 10 секунди.

Стъпка 2:

Изплакнете и подсушете.

Полезни съвети!

Ако кавитета е много тесен може да се използва къс, ендо накрайник.

Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755

www.miplant.bg