



Trèswhite Треуайт

Състав: Шина с 10% водороден пероксид, флуор и калиев нитрат

Предписания:

1. Съхранявайте избелващият продукт на недостъпно за малки деца място.
2. Стоматологичният преглед е препоръчителен преди избелване. Някои оцветявания могат да се нуждаят от стоматологично лечение различно от избелване. Керамични корони, фасети и бели пломби не се повлияват от избелване.
3. Желателно е да се ползва от пациенти със здрава венечна тъкан. Може да настъпи раздразнение на венеца, ако се ползва от пациенти с периодонтални заболявания.
4. Този продукт не е за нощно ползване.
5. Понякога, някои зъби могат да се избелят по-бързо или по-бавно от другите. Резултати могат да са различни. В приблизително 5% от случаите може да се появи съпротивление на избелването. Избелването на зъби с голямо количество метален пълнеж може да причини появата на цвета на метала през зъбите.
6. Киселинни храни/сокове могат да причинят чувствителност ако се консумират скоро след избелване.
7. Не пушете и не яжте по време на избелване.
8. Не е желателно избелване по време на бременност.
9. Съхранявайте далеч от топлина и пряка слънчева светлина. Не замръзвайте продукта.

Предупреждение:

Някои пациенти могат да получат чувствителност, ако това се случи, доста често чувството е леко и краткотрайно, но в някои случаи може да се наложи лечение от Вашия стоматолог. Ако почувствате значителен дискомфорт, спрете да използвате продукта и се консултирайте с Вашия стоматолог. Ако имате някакви въпроси за този продукт или лечение, моля обърнете се към Вашия стоматолог.

“U” – горна избелваща шина

“L” – долна избелваща шина

- ❖ Центрирайте шината върху челюстта
- ❖ Леко натиснете върху мястото
- ❖ Махнете горната шина
- ❖ С лек натиск адаптирайте вътрешната шина към челюстта си

Носете в продължение на 30-60 минути минимум на ден. Когато приключите с избелването, свалете избелващата шина и изчеткайте зъбите.

Условия за съхранение:

Да се съхранява при ниска температура (в хладилник) ако не се употребява ежедневно.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Срок на годност: 12 месеца

Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

Последна редакция на листовката

Февруари 2004 г.