



Ultra Ez Ултра Из

Намаляващ свръхчувствителността гел

Състав:

Ултра Из е непрекъснато излъчващ 3% калиев нитрат, 0.11% от теглото флуориден йон, лепкав, вискозен гел. Ултра Из е предназначен за поставяне в индивидуално изработена шина.

Спринцовка - 1.2 ml за единична употреба с накрайник.

Индикации:

Ултра Из се използва за намаляване на дискомфорта при чувствителност на корена, пародонтални заболявания, термични и химични промени, избелване на зъбите, мостови конструкции и откриване на корена.

Указания за работа:

1. Прочете инструкциите преди употреба или преди да дадете на пациента продукта.
2. Направете шини подходящи за нуждите на пациента. Вижте лабораторните инструкции или изпратете готовия модел на МиПлант. Зоните на чувствителност трябва да бъдат отбелязани на модела. Ако пациентът вече има изработени шини за избелване, обяснете му да поставя Ултра Из по същия начин както поставя избелващият гел в шините.
3. Ултра Из се разпространява в индивидуална доза 1.2 ml спринцовка. Поставя се цялото съдържание на спринцовката в шината. Ако чувствителността е локализирана, поставете гел в засегнатите зони и малко количество в областта на моларите, за да задържа шината на място.
4. Продължителността и колко пъти трябва да се носи шината, зависи от състоянието, заболяването, пациента и стоматолога. Препоръчителното лечение по принцип е от 15 минути до 8 часа. Обикновено между 2 и 4 часа е достатъчно.
5. Шините трябва да се снемат по време на хранене. Като свали шините, пациентът трябва да си измие зъбите. Да не се поглъща получената течност по време на изплакване на зъбите. Шините трябва да се измият и да се поставят в кутийката, предназначена за тях. Трябва да се поставя нов гел при всяка апликация.
6. Гелът може да се затопли леко преди поставяне в шините, за да се избегне термична чувствителност ако е бил съхраняван при по-ниска температура.

Ултра Из се предлага само от стоматолози и се прилага само под техен контрол.

Предупреждения:

Шината с Ултра Из гела трябва да се сваля при хранене. След свалянето на шината, пациентът трябва да измие шината с четка и вода. Да не се гълта разтвор по време.

За стоматологична употреба само!

Условия за съхранение:

Да се съхранява на стайна температура от 18°C до 25°C.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Срок на годност: 36 месеца

Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

Последна редакция на листовката
1997 г.

