



ULTRADENT Products – USA

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!

Diamond Polish Дайъмънд Полиш

Състав:

1µm и 0.5µm микрокристали от диамант във водна среда. Спринцовки - 1.2 ml.

Индикации:

Използва се за полиране на порцеланови и композитни възстановявания. Може да се използва интраорално или екстраорално за постигане на силен блясък.

Указания за работа:

I. Полиране на порцелан

1. Контурирайте и завършете цялата повърхност на obturation с Джифи четки, чашки и дискчета (фиг.1).
2. Отвийте капачката от спринцовката. Завийте еднократната Мини канюла върху спринцовката.
3. За да постигнете оптимален контрол, дръжте буталото на спринцовката в дланта си, както е показано на Фиг.2, вместо по обичайният начин, с палец върху буталото.
4. Поставете малко количество Дайъмънд Полиш с диск (фиг.3). За финално полиране, увеличете скоростта на наконечника и използвайте силна струя вода докато полирате.
5. Използвайте силен водновъздушен спрей за финално изплакване.

II. Полиране на композит

1. Контурирайте и завършете цялата повърхност на obturation с Джифи четки, чашки и дискчета и абразивни ленти.
2. Поставете Дайъмънд Полиш с Джифи Гоут Хеър Бръш.
3. Изплакнете и подсушете повърхността.
4. Използвайте ПърмаСиил композит

Предупреждения:

За стоматологична употреба само!

Условия за съхранение:

Да се съхранява на стайна температура.

Да се съхранява на място недостъпно за деца.

Срок на годност: 36 месеца

Датата на изтичане на срока на годност е посочена на опаковката.

Последна редакция на листовката
1999 г.

Производител: Ultradent Products Inc., USA,
Вносител: MiPlant ООД 02/ 950 30 20, 0887 630 755