



ULTRADENT Products – USA

Уважаеми колега, Вие избрахте един много качествен продукт!

EndoRez

Описание:

Уникален биосъвместим, силър/филър за кореновия канал на базата на метакрилат. EndoREZ има хидрофилни характеристики, които осигуряват отлично проникване в дентиновите тубули. Това осигурява по-добри запечатващи свойства и същевременно се поставя и маха много лесно. Рентгеноконтрастът е еквивалентен на гута перка и това улеснява рентгенографското тълкуване. EndoREZ не компрометира агенти за свързване на дентина.

Предназначение:

EndoREZ е предназначен да се използва с гута перка за запълване на кореновия канал. Малкият накрайник NaviTip, размер 30, заедно с един мастер щифт, осигурява максимално запечатване. EndoREZ може да се използва с традиционните ендодонтски техники за obtуриране и/или с топла гута перка.

Процедура:

Бележка: Преди obtуриране, каналите са били инструментирани, а след това почистени и дезинфекцирани с подходящото количество от разтвор на натриев хипохлорид (ChlorCid). Ние препоръчваме новата система за инструментирание Анатомична Ендодонтска Техника EndoEze, заедно с разтвор на натриев хипохлорид нанесен през уникалния накрайник NaviTip. Разтворът на натриев хипохлорид трябва да се премахне напълно от канала с дестилирана вода. Не използвайте кислородна вода! Премахването на излишните течности се опростява с помощта на capillary tip поставен на аспирационната система, а после последван от употребата на книжни щифтове. Много е важно да не се пресуши канала.

Смесване и нанасяне:

1. Проверете навлизането на гутаперковия мастър щифт до желаната дължина за всички канали, които се пълнят. Потвърдете запълването рентгенологично ако е необходимо. Махнете щифта
2. Свалете капачката на спринцовката TwoSpense2, съдържаща EndoRez. Изстискайте малка част върху блокче, за да се уверите, че базата и катализатора изтичат равномерно (фиг. 1). Поставете накрайника Ultra-Mixer на спринцовката TwoSpense2. Изкарайте няколко милиметра от смесения материал върху смесително блокче преди да напълните спринцовката Skini, за да сте сигурни, че смесения материал изтича.
3. Поставете подходящ размер накрайник NaviTip върху спринцовката Skini. Проверете, че накрайникът е добре поставен, за да няма загуба на силър/филър по време на поставянето.
4. Поставете накрайника Ultra-Mixer в задния край на спринцовката Skini (фиг. 2). Натиснете буталото до край, зад излезе въздуха от спринцовката и да изтече материала от накрайника NaviTip. Поставете малко върху блокче. Обърнете внимание колко материал изтича от NaviTip за няколко секунди и това ще ви даде представа колко време отива за напълването на канала.

5. Важна бележка: Каналът трябва да е почистен и оформен преди да поставите NaviTip с EndoRez в канала. Това е необходимо, за да се получи качествено лечение на кореновия канал, но също така, за да не попаднат отпилките в EndoRez в найкрайника и да го задръстят.
6. Поставете NaviTip в канала на 2-3 mm преди апекса или точно преди да усетите затягане (фиг. 3). Не поставяйте в канала ако усетите стягане. Това може да доведе до преминаване на излишен EndoRez отвъд апекса (вижте предпазна мярка #2)..
7. Оттегляйте внимателно коронарно спринцовката Skini докато шприцвате силъра в каналното пространство. Запълването на каналното пространство до пулпния под ще осигури достатъчно силър за obtуриране на канала.
8. Поставете предварително изпробвания мастър щифт на мястото. Избягвайте множествени поставяния и/или натискания нагоре надолу, за да не премине EndoRez през апекса (вижте предпазна мярка #2).
9. Изрежете излишната гута перка на каналния орифициум с горещ инструмент. EndoRez ще се втвърди в канала за 15-30 минути.
10. Смесителният найкрайник трябва да се остави върху спринцовката TwoSpense2 между отделните пациенти.

Щифтове:

Започнете препарирането за щифта първо с борерите Gates Glidden 2-4, след това изберете желаните от вас борери. EndoRez лесно се изважда чрез изборване, за да могат да се поставят щифтовете. Препоръчваме микроабразирани титаниеви или адхезивни PermaPosts циментирани с PermaFlo DC дуален цимент и двойно полимеризиращ бондинг.

Предпазни мерки:

1. Не използвайте при пациенти с доказана чувствителност към композити, включително метакрилати.
2. NaviTip трябва винаги да е на 2-3 mm от апекса и да стои свободно в канала, дори ако това означава да се изтегли найкрайника навън от канала преди нанасянето на EndoRez. Не позволявайте на материала да премине апекса. Внимавайте материала да не премине апекса по време на поставяне на гута перката. Малки количества, които се виждат рентгенологично не са проблем.
3. Найкрайниците са за еднократна употреба.
4. Системата за нанасяне TwoSpense2 не е предназначена за интраорална употреба.
5. Избършете отвора на TwoSpense2 преди да поставите капачката обратно. Внимавайте да не замърсите спринцовката при избърсването.

Производител: Ultradent Inc. - USA

Представителство за България: MiPlant ООД, тел. 02/950 30 20, 0887 630 755

www.miplant.bg; miplant@miplant.bg