

# FLUORESCENT ORTHO-JET

## Описание на продукта:

Бързо полимеризираща се ортодонтска акрилна пластмаса

## Съдържание според опаковката:

Кат.# 2820 нето тегло 100g

Кат.# 2830 нето тегло 454 g

Кат.# 2850 нето тегло 2,3 kg

Кат.# 2870 нето тегло 11,3 kg

Кат.# 2893 нето тегло 6 x 45 g; нетен обем: 118 ml; стъклена пипета

## Предназначение за употреба:

Този продукт е предназначен за изработването на ортодонтски конструкции.

Когато се използва според указанията за употреба, продуктът е 100% ефективен.

## Условия/указания за съхранение:

Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте в оригиналния контейнер на хладно, сухо, добре проветрено място, далече от източници на пламък и на светлина!

## Инструкции за работа:



F – Силно  
Огнеопасно!



Xn – Вредно!

Течността може да предизвика кожни раздразнения.

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Носете предпазни ръкавици, предпазни очила и странични щитове (капаци) или очила против химически разливи. Избягвайте продължително вдишване или пари на продукта.

Употребявайте при подходяща вентилация.

Не пушете при наличие на отворен контейнер в помещението.

**ВНИМАНИЕ!** Лесно запалима течност. Съдържа: methyl methacrylate monomer, стабилизиран. Точка на възпламеняване: 11,5°C (52,7°F), Степени на риск според международните класификации по номера (NFPA, NPCA-HMIS #): H-2, F-3, R-2.

Риск за здравето (health hazard (H)): H2 = интензивно или продължително излагане може да причини временна неработоспособност или възможно остатъчно нараняване, в случай, че не се окаже незабавна акуратна медицинска помощ!

Опасност от възпламеняване (flammability (F)): F3 = течни и твърди вещества, които могат да се възпламенят при почти всякакви условия на средата.

## Противопоказания:

Fluorescent Ortho-Jet (Флуоресънт Орто-Джет) е противопоказан за пациенти, които имат алергии към мономера.

## Други материали/оборудване, от които имате нужда за работа с продукта:

1. Ортодонтска тел
2. Леплив восък
3. Изолация – **Liquid Foil**
4. Шлифовъчна лента или камък
5. Джет Сийл (**Jet Seal**) – акрилен силант – за запечатка и гланц.
6. Аквапрес (**Aquapres**) – устройство за полимеризиране под налягане – по избор.

## **ВАЖНО!**

**За трайни и стабилни резултати, винаги разклащайте течността преди употреба, за да се хомогенизират катализаторът и мономерът.**

### **Инструкции за употреба:**

1. Върху подготвен модел, огънете ортодонтската тел по конвенционалния начин.
2. Прикрепете я към модела с лепливия восък.
3. Поставете модела във вода и накиснете за 5 минути.
4. Отстранете модела от водата и изсушете/издухайте излишната вода. Нанесете тънък слой изолация **Liquid Foil** върху модела и оставете да изсъхне за около 1 минута.
5. Навлажнете повърхността с течния Орто-Джет. След това нанесете пудрата Флуоресънт Орто-Джет от флакона. Редувайте течност с пудра, докато постигнете желаната форма и плътност. Винаги започвайте и завършвайте с течността, за да постигате най-добри резултати!
6. Оставете акрила да достигне състояние на гел за около 1 минута. Полимеризирайте акрила, както е върху модела, поставен на стойка **Jug** за още 10 минути, за постигане на по-добър резултат с Aquapres (уредът за полимеризиране под налягане) при 30 psi.
7. Отстранете от модела, когато акрилът се е втвърдил и оформете като използвате шлифовъчната лента или камък. Шлифовайте докато постигнете гладък завършек.
8. Полирайте с Джет Сийл (**Jet Seal**) или с пемза и гланц.

### **Изхвърляне**

Изхвърляйте излишния (неизползван) материал в съответствие с местните, регионалните и държавните разпоредби и законодателство.

### **Гаранция**

Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже никакви производствени дефекти, за срок от една година от датата на покупката. Гаранцията се обезсилва, ако продуктът не е използван според предназначението си, ако не е използван според инструкциите за употреба, или не е съхраняван в оригиналния контейнер.

Производител:

LANG – Lang Dental Mfg. Co., Inc.

Wheeling, IL 60090-0969

[www.LangDental.com](http://www.LangDental.com)

Made in USA

Тел.: 847-215-6622

Факс: 847-215-6678

### **ПРЕДСТАВИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:**

МиПлант ЕООД, София

бул. „Арсеналски” 15, ет.1;

тел.: 02 950 30 20;

[www.miplant.bg](http://www.miplant.bg)

[miplant@miplant.bg](mailto:miplant@miplant.bg)

**МиПлант – ние работим за успеха ви!**