

# JET SEAL

Описание на продукта:

## Сийлант за акрилна пластмаса (смола)

Съдържание според опаковката:

Кат. # 4102	нетен обем: 30 ml; четки за еднократна употреба
Кат. # 4106	нетен обем 946 ml
Кат. # 4107	нетен обем 3,8 l
Кат. # 4108	нетен обем: 19 l

## Предназначение на продукта:

Този продукт е предназначен за употреба като запечатващ агент за акрил (силант). Когато се използва според инструкциите за употреба, продуктът е 100% ефективен.

## Условия/указания за съхранение:

Затваряйте контейнера плътно след употреба. Съхранявайте в оригиналния контейнер на хладно, сухо, добре проветрено място, далече от източници на възпламеняване и светлина.

## Инструкции за работа:



F – Силно  
Огнеопасно!



Xn – Вредно!

Течността може да предизвика кожни раздразнения. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Носете предпазни ръкавици, предпазни очила и странични щитове или очила против химически разливи. Избягвайте продължително вдишване или пари на продукта. Употребявайте при подходяща вентилация. Не пушете при наличие на отворен контейнер в помещението.

**ВНИМАНИЕ!** Лесно запалима течност. Съдържа: methyl methacrylate monomer, стабилизирани. Точка на възпламеняване: 11,5°C (52,7°F), Степени на риск според международните класификации по номера (NFPA, NPCA-NMIS #): H-2, F-3, R-2.

Риск за здравето (health hazard (H)): H2 = интензивно или продължително излагане може да причини временна неработоспособност или възможно остатъчно нараняване, в случай, че не се окаже незабавна акуратна медицинска помощ!

Опасност от възпламеняване (flammability (F)): F3 = течни и твърди вещества, които могат да се възпламенят при почти всякакви условия на средата.

## Противопоказания:

Jet Seal (Джет Сийл) е противопоказан за пациенти, които имат алергии към мономер.

## Други материали/оборудване, от които имате нужда за работа с продукта:

1. Четка за еднократна употреба.

## Инструкции за употреба:

1. С четката, нанесете тънък слой **Jet Seal** върху участъка за запечатване. Оставете да полимеризира за 1-2 минути. (Избягвайте плътни слоеве!)
2. Повторете стъпка 1, за да постигнете гланц, ако желаете това.

## Изхвърляне

Изхвърляйте излишния (неизползван) материал в съответствие с местните, регионалните и държавните разпоредби и законодателство.

## Гаранция

Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже никакви производствени дефекти, за срок от една година от датата на покупката. Гаранцията се обезсилва, ако продуктът не е използван според предназначението си, ако не е използван според инструкциите за употреба, или не е съхраняван в оригиналния контейнер.

Производител:  
LANG – Lang Dental Mfg. Co., Inc.  
Wheeling, IL 60090-0969  
[www.LangDental.com](http://www.LangDental.com)  
Made in USA  
Тел.: 847-215-6622  
Факс: 847-215-6678

## ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:

МиПлант ЕООД, София  
бул. „Арсеналски” 15, ет.1;  
тел.: 02 950 30 20;  
[www.miplant.bg](http://www.miplant.bg)  
[miplant@miplant.bg](mailto:miplant@miplant.bg)