

# Jet Adjusters

Система от течни бои за оцветяване/индивидуализиране на акрил



- Осем трайни, транспарентни, стабилни цвята.
- Разнообразието от цветове създава естествено излъчване на съзвонието.
- За клинична и лабораторна употреба. Може да се полагат дори и непосредствено преди предаването на готовата конструкция.
- Не е необходимо последващо полиране с абразив.
- Полимеризира на въздуха за по-малко от 2 минути.
- Съществува химическа връзка към подлежащата акрилна пластмаса.
- Елиминира повърхностният порьозитет

**цветове: Blue, Brown, Clear, Grey, Orange, Violet, White, Yellow,**

**разтворител, Brush Cleaner\***

Джет Аджъстърс

кат. No.	Описание
<b>3299</b>	<b>Кит: 8 бр x10 ml от избраните цветове</b>
3201*	1 флакон боя 10ml (посочете цвят)

3201T	Разтворител 10ml
3201BC	Brush Cleaner 10 ml

## JET ADJUSTERS Описание на продукта:

Акрилна течна боя за естетически модификации на временни коронки и протези

## Съдържание според опаковката:

Кат.# 3299	Кит: 8 броя x 10 мл от различните цветове + четки за еднократна употреба
Кат.# 3201	1 бр. шишенце с боя - нетен обем 10 мл; цвят по избор
Кат.# 3201T	Разтворител (Thinner) – нетен обем 10 мл
Кат.# 3201BC	Течност за почистване на четките (Brush Cleaner) – нетен обем 10 мл

## Предназначение:

Този продукт е предназначен за цветно модифициране/индивидуализиране на временни коронки и мостове, плакови протези.

Когато се използва според указанията за употреба, продуктът е 100% ефективен.

## Съхранение:

Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте в оригиналния контейнер на хладно, сухо, добре проветрено място, далече от източници на пламък и на светлина!

## Инструкции за безопасност:



F–Силно  
Огнеопасно!



Xi–Предизвик

### ВНИМАНИЕ!

Течността може да предизвика кожни раздразнения. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Носете предпазни ръкавици, предпазни очила. Избягвайте продължително вдишване на парите на продукта. Употребявайте при подходяща вентилация.

Не пушете при наличие на отворен контейнер в помещението.

Лесно запалима течност. Съдържа: methyl methacrylate monomer, стабилизирани. Точка на възпламеняване: 11,5°C, Степени на риск според международните класификации по номера (NFPA, NPSA-HMIS #): H-2, F-3, R-2. Опасност от възпламеняване (flammability (F)): F3 = течни и твърди вещества, които могат да се възпламенят при почти всякакви условия на средата. Риск за здравето (health hazard (H)): H2 = интензивно или продължително излагане може да причини временна неработоспособност или възможно остатъчно нараняване, в случай, че не се окаже незабавна акуратна медицинска помощ!

**МиПлант – ние работим за успеха ви!**

**ПРЕДСТАВИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:** МиПлант ЕООД, София бул. „Арсеналски“ 15, ет.1;  
тел.: 02 950 30 20, 0887 630 755, 0898 630 755 ; [www.miplant.bg](http://www.miplant.bg); [info@miplant.bg](mailto:info@miplant.bg)

раздразнения!

### **Противопоказания:**

**Jet Adjusters** (Джет Аджъстърс) е противопоказан за пациенти, които имат алергии към мономера.

### **Други материали/оборудване, от които имате нужда за работа с продукта:**

1. Четка

### **Инструкции за употреба:**

1. Финирайте модела както обикновено. Изплакнете и изсушете. Не полирайте.
2. Разклатете шишенцето с **Jet Adjusters** преди употреба. Натопете четката и положете боя на тънък слой върху желанния участък. Изчакайте боята да засъхне най-малко 30 секунди.
3. Поставете следващ слой, ако е необходимо.
4. Почиствайте четката в течността за почистване **Jet Adjusters** всеки път, преди да смените цвета и преди да използвате разтворителя **Jet Adjusters Thinner**.
5. След като сте завършили оцветяването, поставете слой от **Jet Adjusters Clear**, за гланц и блясък.
6. Оставете **Jet Adjusters** да полимеризират напълно за 1-2 минути върху модела, преди да циментирате в устата на пациента.
7. Почистете върха на шишенцето, преди да затворите капачката.

### **Възможни приложения на цветовете:**

Син (Blue): за инцизална трансlucentност и за неутрализиране на оранжевия цвят.

Кафяв (Brown): за потъмняване на гингивата и за подчертаване и характеризиране на ивици, влакна и тютюневи петна.

Сив (Grey): за инцизална трансlucentност и за неутрализиране на всеки друг цвят

Оранжев (Orange): за потъмняване на гингивата и за характеризиране и подчертаване на ивици, влакна и тютюневи петна.

Виолетов (Violet): прави цветовете по-трансlucentни и неутрализира жълтия цвят.

Бял (White): за характеризиране/подчертаване на петна от калцификация и инцизални участъци, и за изсветляване на даден цвят.

Жълт (Yellow): променя цялостния цвят на зъба.

### **За да направите цвета на зъба по-тъмен:**

59, 60, 61, 62 и 66

65 и 67

69,77, 81 и 87

### **Използвайте:**

кафяв или оранжев

сив или жълт

кафяв или сив

### **Изхвърляне**

Изхвърляйте излишния/неизползван материал в съответствие с местните, регионалните и държавните разпоредби и законодателство.

### **Гаранции**

Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже никакви производствени дефекти, за срок от една година от датата на покупката.

Гаранцията се обезсилва, ако продуктът не е използван според предназначението си, ако не е използван според инструкциите за употреба, или не е съхраняван в оригиналния контейнер.

Производител: LANG – Lang Dental Wheeling, IL 60090-0969 [www.LangDental.com](http://www.LangDental.com) Made in USA

## **МиПлант – ние работим за успеха ви!**

**ПРЕДСТАВИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:** МиПлант ЕООД, София бул. „Арсеналски” 15, ет.1;  
тел.: 02 950 30 20, 0887 630 755, 0898 630 755 ; [www.miplant.bg](http://www.miplant.bg); [info@miplant.bg](mailto:info@miplant.bg)