

Liquid foil

Разделителен разтвор - изолатор за гипс.

Съдържание според опаковката:

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Кат.# 2203 нетен обем 118 ml | Кат.# 2230 нето тегло 454g |
| Кат.# 2206 нетен обем 1,9L | Кат.# 2270 нето тегло 11,3kg |
| Кат.#2208 нетен обем 5gal. | Кат.# 2280 нето тегло 45,4kg |
| | Кат.# 1470 нето тегло 11,3kg |
| | Кат.# 1480 нето тегло 45,4kg |

Предназначение за употреба:

Този продукт е предназначен за изолиране на акрила от гипсовия модел.

Условия/указания за съхранение:

Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте на хладно и сухо място.

Прахът може да предизвика кожни раздразнения. Избягвайте създаването на облак от прах при работа, преместване и почистване. Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото. Носете предпазни ръкавици, предпазни очила със странични щитове или очила против химически разливи. Избягвайте продължително вдишване на праха. Използвайте при подходяща вентилация. Не пушете при наличие на отворен контейнер в помещението. Вижте MSDS за подробна информация относно свойствата на продукта.

Други материали/оборудване, от които имате нужда за работа с продукта:

За течността:

1. Четка

За праха:

1. (Съд със) скала или лъжица за измерване
2. Празно шишенце с капак от 120мл (4 oz)
3. Джет Аджъстърс (**Jet® Adjusters**) - акрилни бои – по избор
4. Джет Сийл (**Jet® Seal**) – акрилен силант – за запечатка и гланц – по избор
5. Аквапрес (**Aquapres®**) – устройство за полимеризиране под налягане – по избор.

Инструкции за употреба:

За течността:

1. Накиснете гипсовия модел във вода, докато се напои
2. Извадете модела от водата. Изсушете повърхността.
3. Намажете тънък равен слой от течността върху тази част от модела, която ще влезе в контакт с акрила.
4. Оставете да се изсуши за около 3 минути.

За праха:

1. Прибавете 1,5гр (приблизително 1/2 чаена лъжичка) прах към 70мл топла вода.
2. Разклатете енергично в продължение на 1 минута, или докато прахът не се разтвори напълно.
3. Продължете съобразно **инструкциите за течността** (по-горе).

Гаранция

Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже никакви производствени дефекти, за срок от една година от датата на покупката. Гаранцията се обезсилва, ако продуктът не е използван според предназначението си, ако не е използван според инструкциите за употреба, или не е съхраняван в оригиналния контейнер.

Производител:

LANG – Lang Dental Mfg. Co., Inc.

www.LangDental.com

Made in USA

ПРЕДСТАВИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:

МиПлант ЕООД, София

бул. „Арсеналски” 15, ет.1;

тел.: 02 950 30 20; 0887 630 755,

www.miplant.bg

МиПлант – ние работим за успеха ви!