



ULTRADENT Products - USA

Уважаеми колега,
Вие избрахте един много качествен продукт!

Tissue Management Kit

Комплект за хемостаза и контрол на сулкусните течности.

Индикации:

Чрез осигуряване на тотална хемостаза реализира перфектен отпечатък.

За лесен и ефективен контрол над кървенето при:

- снемане на отпечатък
- obtуриране
- пулпотомии, екстирпации
-

Други предимства:

- Не влошава адхезията на obtурациите.
- Astringent, Astringent X и ViscoStat имат срок на годност 24 месеца в IndiSpense System.
- Спестява време и пари.

Описание:

Комплектът притежава средствата, необходими за ретракция и хемостаза на маргиналната гингива, с което се осигурява точен и завършен отпечатък.

Приложения:

Прекратяване на кървенето при:

- снемане на отпечатък от препарирани зъби
- obtуриране в непосредствена близост до гингивалния сулкус
- циментиране на корони, мостове, инлеи
- пулпотомии
- за локална хемостаза на по-големи съдове при операции с ламбо

Начин на употреба

Инфузионна техника за хемостаза на маргиналния пародонт

Постпрепарационна /стандартна/ техника

1. Хемостаза

Препарирайте зъба. Заредете Dento-Infusor спринцовката с хемостатичен разтвор на железен сулфат от 30 милилитровата IndiSpense (голямата) спринцовка. Поставете накрайника Dento-Infusor Tip. Въведете го във венечната бразда. Започнете да триете с умерен натиск срещу кървящата тъкан, като бавно въвеждате хемостатичния разтвор. Тази инфузия в прерязаните капилярни отвори ги слепва с коагулуми. Пазете мястото влажно за улесняване отстраняването на външните коагулуми. Асистента трябва да овлажнява полето, чрез водно-въздушен спрей и аспирирайки да поддържа непрестанно чисто оперативното поле. Така се намалява импактирането с химически съединения на меките и твърдите тъкани.

2. Ретракция

Проверете качеството на постигната хемостаза чрез плътен водно-въздушен спрей. Ако се появи кървене, повторете стъпка т.1. В сулкуса поставете Ultrapak Cord – плетения ретракционен конец с уникален дизайн – припокриваща се примка. Използвайте размер, който изглежда твърде голям, защото плетения конец се компримира при натъпкване в джоба. Тънкият инструмент Ultrapak Packer инвагинира конца, като последния предпазва циркуларния лигамент и маргиналната гингива от травма при позиционирането му. Специалната плетка на конца (“припокриваща се примка”) позволява лесното и трайно натъпкване. Ако конца е бил напоен предварително с хемостатична течност след натъпкването му отстранете излишната течност с водно-въздушен спрей. Така се намалява до минимум импактирането с химически съединения на меките и твърдите тъкани.

3. Отпечатък

За постигане на ретракция Ultrapak Cord е необходимо да остане в сулкуса 1-2 минути. Той е поставен само за ретракция. Отстранете конца и промийте щателно отново. Ако хемостазата (стъпка .1) е проведена правилно, не би трябвало да се появи кървене. При кървене повторете хемостазата. Изплакнете препаратията, изсушете, снемете отпечатък.

Запомнете: Разтриването с умерена сила е основното за слепване на капиллярите, както и за изчистване на повърхността на джоба от коагулума.

Техника с поставяне на конца преди препариране

1. Поставяне на конец

Осигурете чрез препариране апроксимален достъп около препарирания зъб и поставете Ultrapak Cord. Използвайте размер, който изглежда твърде голям, за да компримира и ретрахира гингивата в процеса на поставянето на конца. Тънкият инструмент за поставяне на конци Ultrapak Packer прави поставянето лесно. Конецът е с уникален дизайн – припокриваща се примка, улесняващ събирането му и задържането му на място. Запомнете: За да осигури конецът ретракция по време на препарирането се използва размер достатъчно голям за плътна компресия на сулкуса – например: # 1 за фронтални и # 2 за молари.

2. Препариране

Можете да разширявате субгингивално праговата препаратия чрез рязане в конца. Качеството на уникалния ни конец е да не се оплита в диамантения борер. Кървенето е минимално. В добрия отпечатък се наблюдава малка част от необработения зъб над гингивалното закрепване. Благодарение на нашите конци!

3. Хемостаза

Втривайте по описания по-горе начин с накрайника Dento-Infusor Tip в кървящата тъкан, като хемостатика се въвежда бавно.

4. Отпечатък

Изплакнете с плътен водно-въздушен спрей за почистване. Проверете за окончателна хемостаза. При наличие на остатъчно кървене се повтаря т.3 – Хемостаза.

Предлага се и учебен видеоматериал – попитайте ни за него!

Производител: Ultradent Products Inc. - USA

Продажби и методична помощ: MiPlant ООД, тел. 02/ 950 30 20, 0887 630 755