

ТЕМРО

Описание на продукта:

Акрилна пластмаса за ребазирание на протези със силен омекотяващ ефект

Съдържание според опаковката:

Китове:

Кат.# 1023

Темро прах 100 гр/течност 118 ml, смесителни чашки, мерителни чашки.

Кат.# 1034

Темро прах 454 гр/течност 236 ml, смесителни чашки, мерителни чашки.

Кат.# 1020	прах 100 гр	Кат.# 1003	течност 118 мл
Кат.# 1030	прах 454 гр	Кат.# 1004	течност 236 мл
Кат.# 1050	прах 2,700 кг	Кат.# 1006	течност 946 мл
Кат.# 1070	прах 11,300 кг	Кат.# 1007	течност 3,800 л
Кат.# 1080	прах 45,400 кг	Кат.# 1008	течност 19 л

Предназначение:

Този продукт е предназначен за изработването на протезни ребазации.

Когато се използва според указанията за употреба, продуктът е 100% ефективен.

Условия/указания за съхранение:

Затворете плътно контейнера след употреба. Съхранявайте в оригиналния контейнер на хладно, сухо, добре проветрено място, далече от източници на пламък и на светлина!

Инструкции за работа:



F – Силно
Огнеопасно!

Течността може да предизвика кожни раздразнения.

Избягвайте контакт с кожата, очите и облеклото.

Носете предпазни ръкавици, предпазни очила и странични щитове или очила против химически разливи.

Избягвайте продължително вдишване или пари на продукта.

Употребявайте при подходяща вентилация.

Не пушете при наличие на отворен контейнер в помещението.



Xn – Вредно!

ВНИМАНИЕ! Лесно запалима течност. Съдържа: ethyl alcohol. Точка на възпламеняване: 17,2°C (63°F), Степени на риск според международните класификации по номера (NFPA, NIOSH-HMIS #): H-1, F-3, R-1.

Риск за здравето (health hazard (H)): H1 = възможно е раздразнение или незначително лечимо (възстановимо) нараняване

Противопоказания:

Темро (Темпо) е противопоказан за пациенти, които имат алергии към химикали.

Други материали/оборудване, от които имате нужда за работа с продукта:

1. Шпатула
2. Нож

Инструкции за употреба:

А. Като материал за ребазация и омекотяване на протези:

1. Почистете и дезинфекцирайте базата на протезата. Обработете участъците, които изискват отпускане.
2. Наливайки първо течността, смесете пълна мерителна чашка от течната субстанция на Темро (малката оранжева мерителна чашка от комплекта чашка, около 4мл) с една

пълна чашка от Темро на прах (голямата оранжева чашка, около 7 cm³) и размесете до хомогенно състояние, за около 10 секунди.

3. Оставете сместа да се сгъсти, докато добие вискозитет, и все пак остане течлива. Излейте в онези участъци на протезата, които се нуждаят от третиране.
4. Накарайте пациента да изплакне устата си с вода. Поставете протезата в устата му. Нека пациентът затвори челюстта си до равна оклузия, и нека задържи тази позиция за около 3 минути. След това, пациентът може да говори, да чете на глас или да леко да дъвче, за да създаде функционален отпечатък. Общото време за полимеризация е 20 минути, от момента на първоначалното смесване.
5. Извадете ребазирания протеза от устата на пациента. Проверете дали периферията е добре покрита, и дали е използван достатъчно материал, за да придаде на третираните участъци пълно покритие. Допълнително количество от материала Темро може да бъде добавено по всяко време. Почистете излишния материал с остър нож. Покрийте с акрилен силант, за да запечатате порьозитета на повърхността.

Забележка: Темро може да се отстрани от протезата, като се остърже с нож. В този случай, тънкият остатъчен слой по повърхността на притезаният базис може да се разтвори с акрилен мономер на базата на метил метакрилат.

В. Като материал за функционални отпечатъци:

За да използвате Темро само за създаване на функционален отпечатък, следвайте стъпки от 1 до 5. Оставете пациента да остане с протезата в продължение на 5 до 24 часа. Изтеглете гипсов модел колкото е възможно по-скоро след изваждането на отпечатъка от устата на пациента.

Изхвърляне

Изхвърляйте излишния (неизползван) материал в съответствие с местните, регионалните и държавните разпоредби и законодателство.

Гаранция

Производителят гарантира, че този продукт няма да покаже никакви производствени дефекти за срок от една година от датата на покупката. Гаранцията се обезсилва, ако продуктът не е използван според предназначението си, ако не е използван според инструкциите за употреба, или не е съхраняван в оригиналния контейнер.

Производител:

LANG – Lang Dental Mfg. Co., Inc.

Wheeling, IL 60090-0969

www.LangDental.com

Made in USA

ПРЕДСТАВИТЕЛ И ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ:

МиПлант ЕООД, София

бул. „Арсеналски” 15, ет.1;

тел.: 02 950 30 20 0878 630 755

www.miplant.bg

miplant@miplant.bg

МиПлант – ние работим за успеха ви!