




trèswhite™
by Opalescence®

Дневно избелване с готови шини


Какво е Treswhite?

- Лесна за употреба избелваща система с 6% съдържание на водороден пероксид, с вкус на праскова, диня или мента. Използва се по един час на ден в продължение на 10 дни, без необходимост от изготвяне на индивидуални шини.

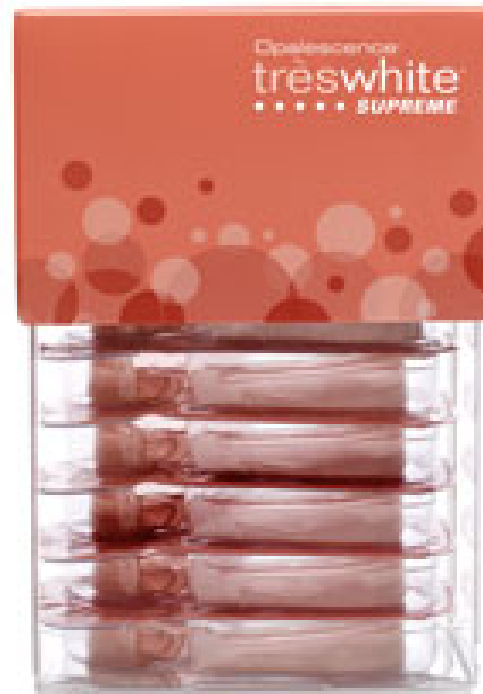

Съдържание на комплекта

- Съдържанието на комплекта е 10, готови за употреба, еднократни шини за горна – “U” и долна – “L” челюст.
- Всяка шина съдържа два вида гел: Бариерен и гел за избелване.

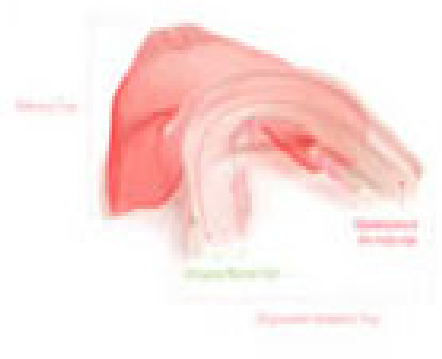



Начин на употреба

1. Изчеткайте зъбите с паста и четка.
2. Почистете междузъбните пространства с конец за зъби.

Начин на употреба

- Извадете силиконовата лъжица, в която се намира шината.






Начин на употреба

- Поставете шината на зъбите.




Начин на употреба

- Притиснете с пръсти към зъбите, за да може гела да залепне за тях.

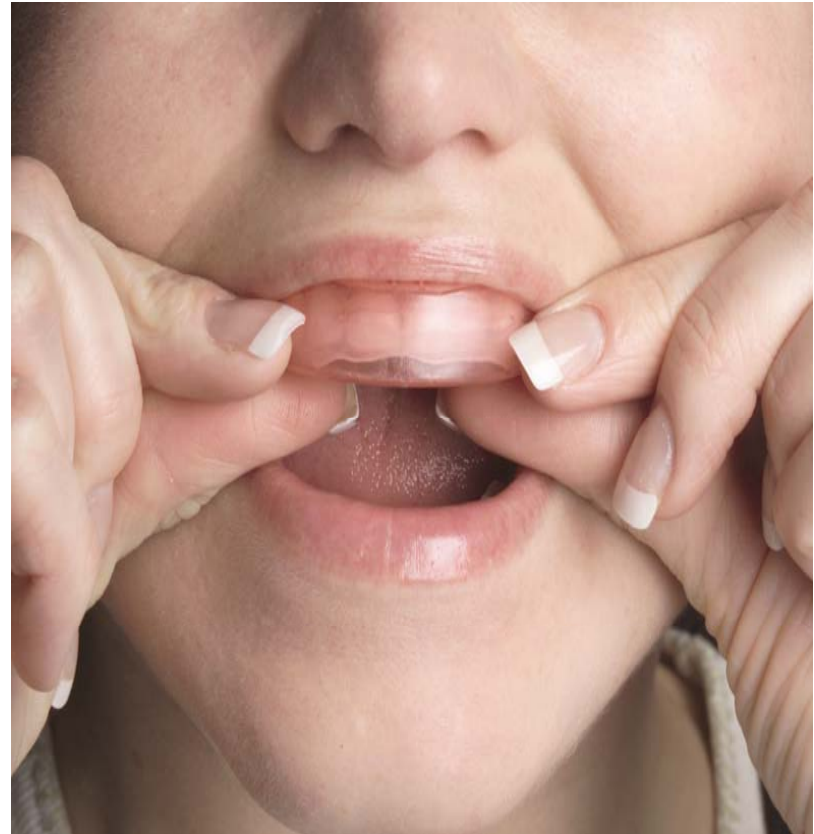

Начин на употреба

- Извадете силиконовата лъжица.

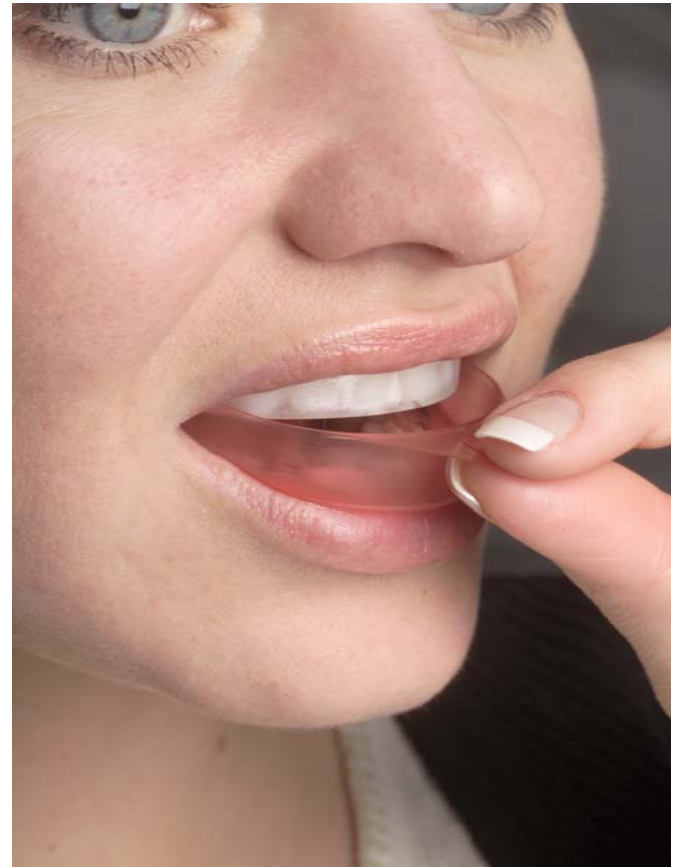

Начин на употреба

- Донагласете тънката и прозрачна силиконова шина на зъбите.



Начин на употреба

- Носете шината в продължение на един час. След това я свалете и си измийте зъбите.





Предимства на Treswhite

- Системата не изисква изработката на индивидуални шини.
- Шините са подходящи за всеки пациент и покриват от 6-ти до 6-ти зъб.
- След инструкция за ползване избелването може да продължи в домашни условия.
- Шините са естетични и не пречат на нормалните дейности или говоренето.



Начин на съхранение

- В хладилник
- Без пряка слънчева светлина

